




HLW-ÜBUNGSPUPPE
PRACTI-MAN
Advance
UNERLÄSSLICH FÜR TRAININGSVERANSTALTUNGEN



MERKMALE UND FUNKTIONEN



➤ **2 IN 1 TRAININGSGERÄTE**

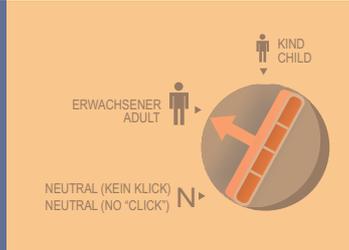

➤ **EINSTELLUNG VON DREI TRAININGSMODI**



➤ **REALE BEATMUNGSFUNKTION**



➤ **TRAINING DES ESMARSCHEN HANDGRIFFS**



➤ **UNIVERSELLES DEFIB TRAINING**



➤ **HYGIENISCH UND LEICHT ZU REINIGEN**

HYGIENEINFORMATION

Um eine mögliche Kontamination von und durch Trainingsteilnehmer zu verhindern, wurden leicht zu reinigende und austauschbare Funktionsteile eingesetzt. Es wird empfohlen für jeden Teilnehmer ein Übungsbeatmungstuch zu verwenden und nach dem Training das Gesichtsteil und Ventil (Mundstück) zu reinigen und den Lungenbeutel auszutauschen.

Somit ist maximale Hygiene und der Schutz jedes Kursteilnehmers garantiert.

REINIGUNG UND DESINFEKTION



Während des Mund-zu-Mund Beatmungstrainings schützen Übungsbeatmungstücher vor möglicher Kontamination.



Nach dem Training sollten Ventil und Lungenbeutel ausgetauscht werden. Entfernen Sie hierzu den Kopf vom Rumpf.



Die Trainingspuppe muss am Ende jeder Trainingseinheit desinfiziert werden. Entfernen Sie hierzu die Gesichtshaut, um das Mundstück und Gesicht zu reinigen.



Legen Sie die Gesichtshaut in einen Behälter mit Wasser und Desinfektionsmittel ein.

■ LIEFERUMFANG DES PRACTI-MAN ADVANCE SET:

1 Trainingspuppe, Handbuch mit Fragen und Antworten, 5 Ersatzlungen, 2 Ersatzmundstücke.



BEDIENUNGSANLEITUNG



1 Brusthaut entfernen.



2 Gesichtshaut entfernen.



3 Kopf in die beiden seitlichen Halterungen mit dem Rumpfteil verbinden. Achten Sie auf korrekte Position!



4 Lunge von der Brust unter dem Kinn durch den Mundraum führen.



5 Lunge mit dem Mundstück (Ventil) verbinden.



6 Stellen Sie sicher, dass das Mundstück korrekt positioniert und fixiert ist.



7 Lunge auf den Klebmarkierungen der Brust befestigen. Stellen Sie sicher, dass die Lunge lose auf dem Hals aufliegt.



8 Gesichtshaut auf der Nase befestigen (obere Lasche anziehen) und dann an den seitlichen Halterungen fixieren.



9 Brusthaut an den seitlichen Halterungen befestigen.

GEWÄHRLEISTUNGSZERTIFIKAT



Dieses Produkt hat erfolgreich die strengsten Qualitätskontrollen durchlaufen, bevor es das Werk verlassen hat. Dennoch kann es zu Fehlfunktion aufgrund von Montage und / oder Komponentenfehlern kommen. Lesen Sie in diesem Fall die Garantiebestimmungen und kontaktieren Sie Ihren Händler. ENFAVI, SL gewährt zwei Jahre Garantie ab Rechnungsdatum.

Wenn es während der Garantiezeit zu Produktfehlern kommt, die auf den Herstellungsprozess oder Materialversagen zurückzuführen sind, muss der Verbraucher den Händler innerhalb von 10 Werktagen informieren, nachdem er den Defekt bemerkt hat. Nach dem Ermessen des Händlers wird das Produkt entweder repariert oder ersetzt.

GARANTIEBEDINGUNGEN:

Im Falle eines Gewährleistungsanspruchs benötigen Sie die Rechnungskopie mit Angaben des Kaufdatums. Die Rechnung muss Name und Anschrift des Käufers und Verkäufers enthalten.

DIE GARANTIE ERLÖSCHT:

- Bei Schäden die durch nicht sachgerechte Handhabung, Fahrlässigkeit oder mutwilliger Zerstörung entstanden sind.
- Wenn das Produkt nicht seinem bestimmungsgemäßen Zweck eingesetzt wurde
- Bei Beschädigungen und/oder Mängeln die durch den Einsatz von säurehaltigen Flüssigkeiten oder anderen Chemikalien (ätzende Stoffe)

entstanden sind.

- Bei Schäden durch unsachgemäße Wartung oder mangelnde Reinigung.
- Bei Beschädigung und/oder Mängeln durch die Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen des Herstellers.
- Bei Schäden die durch unsachgemäße Reparaturen von nicht autorisierten Personen durchgeführt wurden.
- Nach Veränderung der Rechnungsdaten, Manipulation des Kassenbons oder der Originalverpackung

Geographische Abdeckung: Die Garantie gilt in allen Ländern, in denen das Produkt von einem autorisierten Händler von ENFAVI, S. L. vertrieben wird.



Vertriebs- und Logistikzentrum
Humboldtstr. 9
86316 Friedberg/Bay.

Tel. 0821 9078000 www.medx5.com



HERSTELLERADRESSE

ENFAVI S.L. TEL. +34 965 554 708 / FAX +34 965 551 312
Pol. Ind. L'Alfaç II, C/ Cadiz, 28 - 03440 Ibi - Alicante - SPAIN
www.vimetcasa.com - info@vimetcasa.com - international@vimetcasa.com